

INSTRUÇÕES DE USO

CLEARLENS SOLUÇÃO CONSERVADORA
Solução Conservadora para Lentes de Contato

DESCRIÇÃO

Clearlens Solução Conservadora tem ação de desinfetar e conservar as lentes de contato sem irritar os olhos. Elimina micro-organismos prejudiciais da superfície da lente. Lubrifica as lentes antes do uso. Proporciona um conforto prolongado durante todo o dia, mesmo para olhos sensíveis. Lubrifica as lentes e alivia pequenas irritações e o desconforto durante o uso das lentes.

Para todos os tipos de lentes Hidrofílicas (gelatinosas), Silicone-Hidrogel e RGP (rígida gás permeável).

Não contém clorexidina nem tiomersal.

COMPOSIÇÃO

Solução isotônica, tamponada e estéril contendo EDTA, Fosfatos, Cloreto de Sódio, Citrato de Sódio, Glicerol, Ácido Hialurônico e PHMB 0,00013% (conservante).

INDICAÇÕES

Clearlens Solução Conservadora é indicada para desinfecção, conservação diária, lubrificação, enxágue e armazenamento de todas as lentes de contato gelatinosas (hidrofílicas), silicone hidrogel e RGP (rígida gás permeável).

INSTRUÇÕES PARA LIMPAR, DESINFETAR:

1º passo - As mãos:

Sempre lavar e enxaguar suas mãos antes de manusear suas lentes de contato.

2º passo - Limpeza e fricção:

Acomode a lente na palma da mão.

Enxágue completamente os dois lados da lente com Clearlens Solução Limpadora, e, com o dedo indicador da outra mão, friccione-a cuidadosamente de maneira linear (para frente e para trás e também para ambos os lados, em forma de cruz). Este procedimento deverá ser efetuado em ambos os lados da lente. Evite tocar a lente com a unha a fim de evitar a possibilidade de rasgos ou danos à mesma.

3º passo - Enxágue, desinfecção e conservação:

Enxágue completamente os dois lados da lente com Clearlens Solução Conservadora.

Coloque as lentes limpas no estojo e encha-o com Clearlens Solução Conservadora. Deixe as lentes imersas durante, no mínimo, quatro (4) horas na solução escolhida.

A solução utilizada para desinfecção e acondicionamento deverá ser descartada diariamente. Para reutilizar as lentes, retire-as do estojo, repita o 1º passo e coloque-as nos olhos. Não é necessário enxaguá-las antes de colocá-las.

4º passo - Cuidados com o estojo:

a) Quando utilizar um novo estojo para lentes, enxaguá-lo com Clearlens Solução Conservadora antes de usá-lo, para eliminar qualquer resíduo.

b) Após o uso, sempre esvaziar o estojo para lentes, e enxaguá-lo com Clearlens Solução Conservadora.

c) Enxágue bem o estojo a ser utilizado para o armazenamento das lentes com Clearlens Solução Conservadora e encha-o com esta solução após completar o enxágue.

A cavidade do estojo deve permanecer com solução abaixo de sua borda para evitar que a lente, ao flutuar, seja danificada pela tampa do estojo.

Seu especialista pode recomendar produtos adicionais ou procedimentos para cuidar de suas lentes com base na química de suas lágrimas e seu horário de uso das lentes.

ADVERTÊNCIAS

Siga rigorosamente as instruções de seu especialista e todas as instruções de uso deste produto para o uso e conservação corretos de suas lentes de contato, e dos acessórios que se usam para seu cuidado, incluindo o estojo. Se você sentir um desconforto persistente nos olhos, lacrimejamento excessivo, distúrbios na visão ou vermelhidão, retire **IMEDIATAMENTE** as lentes e consulte seu oftalmologista.

PRECAUÇÕES

Conservar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.

Manter o frasco bem fechado quando não estiver sendo utilizado.

Respeitar a data de validade marcada no produto.

Manter fora do alcance das crianças.

Não usar para desinfecção térmica.

Descartar o restante da solução após quatro meses da abertura do frasco.

Para evitar contaminação do produto não tocar a superfície do conta-gotas.

Sempre usar uma solução nova de Clearlens Solução Conservadora. Não reutilizar a solução do seu estojo para lentes.

Não usar esta solução se for alérgico a qualquer um dos componentes de Clearlens Solução Conservadora.

Importante: Se ocorrer irritação ou lacrimejamento excessivo e estes sintomas persistirem ou se agravarem, ou ainda, se sua visão ficar embaçada, interrompa o uso da solução e procure um especialista.

CONTRAINDICAÇÕES

Pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes de Clearlens Solução Conservadora não devem utilizar este produto.

APRESENTAÇÕES

Clearlens Solução Conservadora é esterilizado por filtração e apresentado em frascos plásticos de 60 mL, 120 mL e 300 mL (ESTÉRIL).

Embalagem com ou sem estojo para lentes.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O armazenamento e o transporte devem ser feitos à temperatura ambiente, entre 15 e 30 °C. O produto deve ser protegido da luz solar e não deve ser congelado.

Prazo de validade: 24 meses.

Fabricado por:

LEBON PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Av. Ricardo Leônidas Ribas, 439 | Distrito Industrial

Porto Alegre | RS | CEP 91790-005

E-mail: lebon@laboratoriolebon.com.br

Fone/Fax: (51) 3250 8256

CNPJ: 87.375.952/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Responsável Técnica: Patrícia Schütz Bittencourt – CRF/RS 14228

Registro Anvisa Nº: 80256510004

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 642 9109

sac@laboratoriolebon.com.br